

PROJETO CRÂNIO-FACE BRASIL

MANUAL PARA ENVIO DE AMOSTRAS - INVESTIGAÇÃO DE DELEÇÃO 22q11.2

ATENÇÃO: após finalizar o formulário na base de dados, fazer upload do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) corretamente preenchido e assinado (pelos sujeitos de pesquisa e médico responsável). Encaminhar junto com a amostra a requisição de exame (disponível na Aba Link para Documentos).

COLETA E ENVIO DE AMOSTRAS:

- Enviar o mais breve possível para evitar morte celular

Tipo de tubo para coleta	Quantidade necessária
Tubo com tampa roxa (EDTA)	2 (4 ml/tubo)

- Identificar todos os tubos com nome e código PCFB (em letra legível e local apropriado).
- Homogeneizar após coleta.
- Colocar os tubos de cada pessoa em sacos plásticos separados (separado da requisição).
- Embalar da seguinte forma: colocar os tubos em sacos plásticos dentro de uma caixa de isopor ou de papelão, junto com a requisição envoltos em um saco plástico separado. Lacrar a caixa com fita adesiva.
- Identificar corretamente o remetente e destinatário.
- Endereço de envio:

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS – UNICAMP

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA MÉDICA – PROJETO CRÂNIO-FACE BRASIL - DEL22
RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CARMAGO, 126 – CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ
CAMPINAS – SP – BRASIL – CEP: 13083-887

COLETAR APENAS SANGUE DO PACIENTE

DEVERÁ SER UTILIZADO QUALQUER TIPO DE ENTREGA **EXPRESSA** (SEDEX, SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, etc) DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO. NUNCA UTILIZAR POSTAGEM CONVENCIONAL (CORREIO NORMAL).

OBSERVAÇÕES:

- Não deve ser colocado nenhum tipo de gelo (*gelo* ou outro) na caixa. As amostras devem ser transportadas em temperatura ambiente.
- Os custos de envio devem ser de responsabilidade do centro participante de origem. Não haverá recurso do projeto para pagamento ou reembolso dos custos de envio.
- As amostras devem ser encaminhadas preferencialmente no mesmo dia da coleta. Quando não for possível, encaminhar no máximo em uma semana.